

Instrukcja czyszczenia i odkażania osłony twarzy - przyłbicy ochronnej



Do czyszczenia użyj miękkiej (niepylącej i nierysującej) ściereczki typu mikrofibra oraz czystego spirytusu o stężeniu min. 70%



Zwilż ściereczkę spirytusem i delikatnymi, okrężnymi ruchami przetrzyj obie strony osłony. Odczekaj, aż spirytus odparuje.

Ważne: szybka przyłbicy zabezpieczona jest z obydwu stron folią – przed czyszczeniem i odkażaniem należy ją usunąć.



ANTARE